


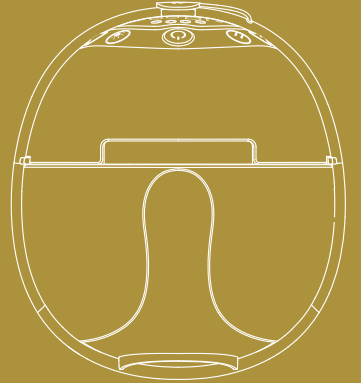

GIOmum
Linea Discreet Light
Sacaleches eléctrico portátil doble

MANUAL DEL USUARIO

Lea este manual de usuario antes de utilizar el extractor de leche portátil y consérvelo para futuras consultas.

Descripción del producto 01


En primer lugar, el extractor de leche puede estimular el patrón de succión del bebé, ayudarlo a succionar el pecho, promover la secreción hipofisaria de prolactina y estimular la secreción de leche del pecho para aumentar la producción de leche, lo que puede ayudar a satisfacer las necesidades de su bebé.

En segundo lugar, el sacaleches puede promover la contracción del epitelio mamario para favorecer la eyección de la leche de los conductos mamarios, asegurar el vaciado del pecho y aliviar la congestión mamaria. Además, el uso regular del sacaleches puede favorecer la succión del exceso de leche de los conductos mamarios, lo que puede ayudar a prevenir la mastitis aguda.

En tercer lugar, el uso del sacaleches puede mejorar la tasa de lactancia directa y aumentar la confianza de las madres en la lactancia, lo cual es beneficioso tanto para las madres como para los lactantes.

En cuarto lugar, este dispositivo es adecuado para uso personal en casa y no se recomienda su uso como herramienta auxiliar en instituciones médicas.


Diagrama de la estructura del producto 02

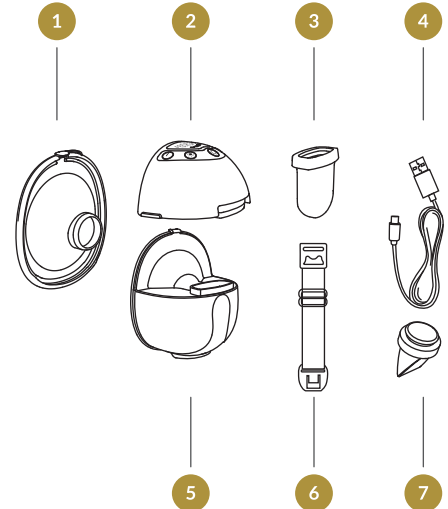

Lista de piezas:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1 Embudo | 4 Cable de carga USB |
| 2 Motor del extractor | 5 Recolector de leche |
| 3 Diafragma de silicona | 6 Extensor de ajuste del sujetador |
| | 7 Válvula |

Descripción de la pantalla LED y de la función de los botones 03

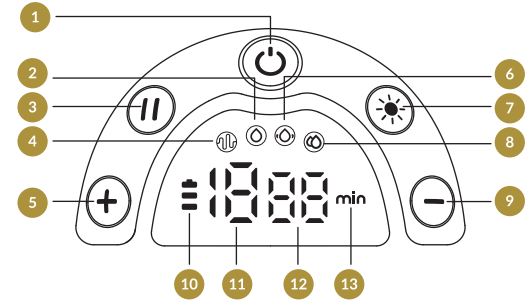

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Botón de encendido/
interruptor de modo | 8 Modo automático |
| 2 Modo de extracción | 9 Botón de bajada de nivel |
| 3 Botón de pausa/ inicio | 10 Indicación de potencia |
| 4 Modo de estimulación | 11 Indicación de nivel |
| 5 Botón para subir de nivel | 12 Indicación de la hora |
| 6 Modo masaje | 13 Hora/Minuto |
| 7 Botón de luz nocturna | |

Montaje 04

Para montar la bomba, siga estos pasos


⚠ AVISO IMPORTANTE

- Asegúrese de limpiar el extractor siguiendo las instrucciones de este manual de usuario.
- Asegúrese de montar el extractor correctamente, siguiendo las instrucciones de este manual de usuario.
- Para evitar fugas, elimine los residuos alrededor del embudo antes de montarla.
- Lávese bien las manos antes de montar los componentes limpios.


1. Monte la válvula en el colector de leche, prestando atención al ángulo de montaje.




2. Coloque el diafragma de silicona en el colector de leche y presiónelo con las manos para que los bordes queden bien sujetos y garantizar un sellado perfecto.

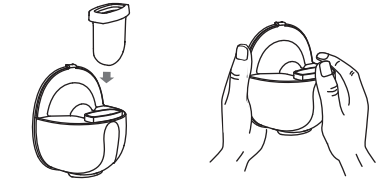


3. Para montar el embudo en el colector de leche, asegúrese de alinear la ranura de desvío del embudo con la ranura de reflujo del colector de leche y, a continuación, presione los bordes con ambas manos para asegurarse de que la junta está en su sitio.

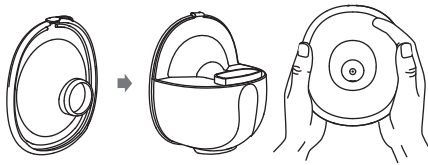

4. La ranura debe estar ahora totalmente alineada con la parte inferior de la brida, de modo que quede completamente sellada a la brida.

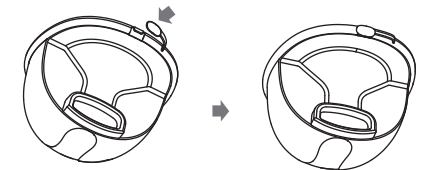


5. Monte el cuerpo principal del extractor de leche en el colector de leche, alinee la muesca situada debajo del cuerpo principal con el diafragma de silicona y móntelo hacia abajo para ajustarlo al colector de leche y garantizar un sellado completo.

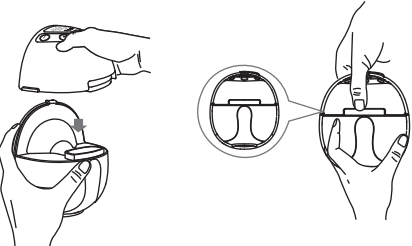

Guía de extracción 07


1. Presiona el embudo firmemente contra tu pecho, sin dejar huecos y asegurándote de que tus pezones están centrados. Manténgalo en posición vertical. Tenga cuidado de no distorsionar la posición del dispositivo y su pecho, de lo contrario el sacaleches no tendrá succión.

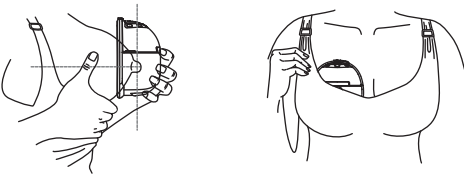


2. Mantenga pulsado el botón de encendido para poner en marcha el extractor de leche hasta que se encienda la pantalla.




3. Puede iniciar o pausar el funcionamiento del sacaleches pulsando brevemente el botón "II". Pulse brevemente el botón "⏻" para cambiar de modo una vez puesto en marcha el extractor de leche. Con este botón puede cambiar entre cuatro modos diferentes (modo de estimulación, modo de extracción, modo de masaje y modo automático). Cuando la "⏻" está encendida, significa que el aparato está en modo de estimulación; Cuando la "⏻" está encendida, significa que el modo de extracción está activado; Cuando la "⏻" está encendida, significa que el modo de masaje está activado; Cuando la "⏻" está encendida, significa que el modo automático está activado.

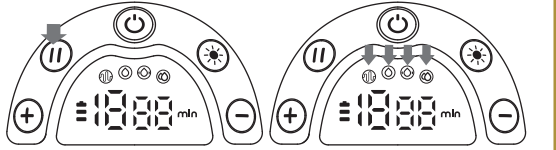

4. Hay 9 niveles disponibles en cada modo. Puede seleccionar el nivel de succión que le resulte más cómodo pulsando brevemente el botón „+” para subir el nivel y el botón „-” para bajarlo.

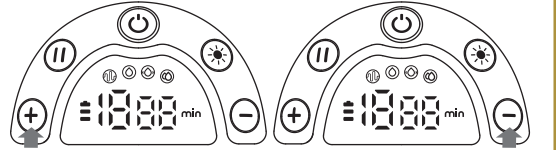

5. Pulse prolongadamente el botón de encendido "⏻" para apagar el extractor de leche.

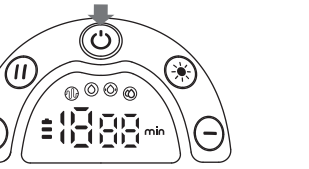

6. Mantenga pulsado el botón "☀️" para encender o apagar la luz nocturna. La luz nocturna se controla de forma independiente, no se apaga cuando se apaga el extractor de leche; puede elegir la función de luz según sus necesidades.



Consejos:

- Este modelo tiene una función de memoria incorporada, cuando se enciende el aparato, entra automáticamente en el modo de estimulación y el nivel de succión utilizados más recientemente (en el modo automático, el nivel de succión 1 es el nivel por defecto).
- El nivel de succión no se recuerda en el modo automático. Cuando el aparato está en modo automático y no se pulsa ningún botón, el nivel aumentará automáticamente cada 15 segundos hasta el nivel 7. Si pulsa un botón durante este tiempo, el aumento automático se detendrá. Si pulsa un botón durante este tiempo, el aumento automático se detendrá.
- Cuando se detiene el funcionamiento del aparato y no se pulsa ningún botón en 5 minutos, el sacaleches se apaga automáticamente.
- El extractor de leche se detendrá automáticamente tras 20 minutos de funcionamiento.

Indicador LED de nivel de batería

10

1. En el extractor de leche se muestran tres niveles de potencia.



2. Durante el uso, si el indicador de potencia está a sólo 1 bar y parpadea, indica que la batería se está agotando. Asegúrate de cargarla a tiempo.



3. El dispositivo no se puede utilizar mientras se carga, en este momento la interfaz de la pantalla sólo muestra el nivel de carga actual. Cuando el nivel de batería muestra 3 barras y no parpadea, significa que la batería está completamente cargada.



4. Después de cada uso, pulsa el botón de encendido para comprobar el indicador de batería. Si la pantalla indica un nivel bajo de batería, cárgala utilizando un cargador DC5V 1A.



Instrucciones para la postura de lactancia

11

Siéntese en una silla cómoda e inclínese ligeramente hacia delante (utilice un cojín para apoyar la espalda). Asegúrate de que tu cuerpo y el sacaleches están alineados.



Postura de lactancia

Instrucciones relativas al extensor de ajuste del sujetador
Ajuste la longitud de los tirantes del sujetador para que la extracción resulte más cómoda. Cuelgue un extremo de la hebilla de ajuste del sujetador en la hebilla interior del sujetador de lactancia. La longitud del sujetador puede ajustarse colgando la hebilla del sujetador de lactancia en el otro extremo de la hebilla de ajuste del sujetador.



Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3


Fin de la sesión de extracción

12


Cuando termine de extraerse leche, retire el extractor del pecho. Mantenga el sacaleches en posición vertical y retire la parte del motor. Sujete el colector de leche para verter la leche materna en el biberón. Asegúrese de que el hueco del colector de leche de la copa de lactancia está alineado con la boca del biberón para evitar que se derrame la leche materna.

1. Cuando termine de extraerse leche, pulse el botón de encendido para apagar el dispositivo y separe el extractor del pecho y el embudo del extractor con el dedo; a continuación, retire con cuidado el extractor del pecho.

2. Separe el colector de leche del motor de la bomba para prepararlo para la alimentación/almacenamiento. Limpie las demás piezas usadas siguiendo las instrucciones.

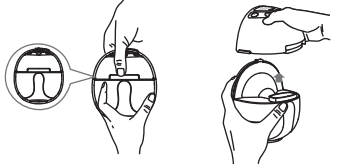

3. Vierta la leche en el biberón; después de abrir la ranura, asegúrese de que está alineada con la boca del biberón.

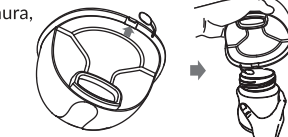

Limpieza

13

Limpieza y mantenimiento	
Primer uso	Después de cada uso
Cuerpo del sacaleche	Limpie con un paño limpio y húmedo con alcohol etílico al 70% o alcohol isopropílico según sea necesario. No sumerja el extractor de leche en agua.
Embudo, diafragma de silicona, válvula y colector de leche	Hervir en agua durante 5 minutos. No introduzca las siguientes piezas en el microondas: Embudo, Diafragma de Silicona, Válvula y Colector de Leche.

AVISO IMPORTANTE

- Tenga cuidado al desmontar y limpiar la válvula; si la válvula está dañada, el sacaleches no funcionará correctamente.
- Para limpiar la válvula, frótelas suavemente en agua tibia con unas gotas de detergente. No introduzca ningún objeto en la válvula, ya que podría dañar el aparato.

Limpieza a mano

- Coloque las piezas del sacaleches en un recipiente limpio que sólo se utilice para artículos de alimentación infantil. No coloque las piezas del sacaleches directamente en el fregadero.
- Añade detergente y agua caliente al lavabo.
- Frote los artículos con un cepillo limpio utilizado sólo para artículos de alimentación infantil.
- Aclárelos manteniéndolos bajo el grifo o sumergiéndolos en agua limpia en un recipiente aparte.
- Séquelo bien al aire. Coloque las piezas del sacaleches en el recipiente y el cepillo para biberones sobre un paño de cocina o papel de cocina limpio y sin usar, en un lugar protegido de la suciedad y el polvo. No utilice el paño de cocina para frotar o dar palmaditas para secar las piezas.
- Limpie el recipiente y el cepillo para biberones, Aclárelos bien y déjelos secar al aire después de cada uso, Lávelos a mano al menos cada pocos días.

Conservar la leche materna

14

Conservar la leche materna

- Guarde únicamente la leche materna recogida con sacaleches esterilizados.
- La leche extraída puede introducirse en una bolsa de almacenamiento de leche limpia y esterilizada o en un biberón de leche con tapa, y colocarse inmediatamente en el frigorífico.

Atención

- No congele la leche materna más de una vez.
- No mezcle leche materna fresca con leche materna congelada.
- Asegúrate de desechar la leche materna sobrante después de la toma.
- La leche extraída puede conservarse en el frigorífico durante 48 horas o en el congelador hasta tres meses. Etiquete el biberón de leche o la bolsa de conservación de la leche con la fecha y la hora claramente marcadas.

Cómo descongelar la leche materna

Coloca la leche materna congelada en el compartimento frigorífico durante toda la noche para que se descongele. Si necesita consumir leche congelada urgentemente, puede utilizar un recipiente o agua caliente para descongelar la leche materna. Después de descongelar la leche materna, debe consumirse en un plazo de 24 horas.

Cómo calentar la leche materna

- Coloca el biberón en un recipiente con agua caliente o calienta la leche materna de forma segura y rápida utilizando un calentador de biberones y alimentos.
- ¡Atención! Antes de alimentar a tu bebé, asegúrate de comprobar la temperatura de la leche materna.

3. No utilice el microondas ni el horno para calentar la leche materna, ya que podría destruir nutrientes y anticuerpos importantes.

4. Además, un calentamiento desigual puede provocar un sobrecalentamiento parcial del líquido, lo que puede causar quemaduras.

5. No sumerja la bolsa de almacenamiento de leche en agua hirviendo para calentarla, ya que podría romperse o agrietarse.

innogio

Fabricado en China para **INNOGIO** sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varsovia, Polonia

www.innogio.com

[f @innogio.official](#) [@innogio_com](#)

