


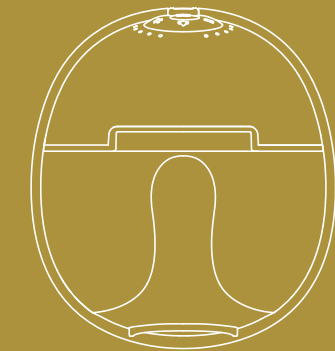

GIOmum Line Premium Warm


Extractor eléctrico portátil
con función térmica

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el extractor de leche y consérvelo para poder consultarlo en caso de necesidad.

Estructura del product

01

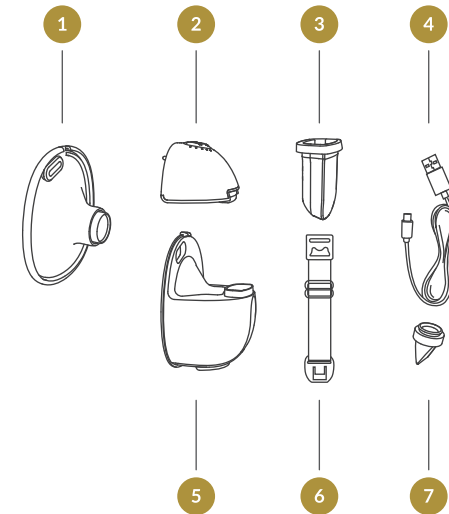


Partes:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1 Embudo | 4 Cable de alimentación USB |
| 2 Motor del extractor | 5 Colector de leche |
| 3 Membrana de silicona | 6 Extensor de ajuste del sujetador |
| | 7 Válvula |

Panel de control y función de los botones

02

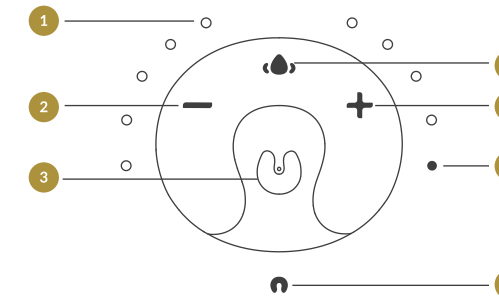

- 1 9 luces que corresponden a 9 niveles de ajuste (de izquierda a derecha)
- 2 Botón para bajar el nivel
- 3 Botón de inicio/selección de modo
- 4 Botón de función térmica
- 5 Botón para subir el nivel
- 6 Indicador de función térmica
- 7 Indicador de encendido

Contenido de la caja

- Embudo • Motor del extractor • Membrana de silicona • Válvula
- Cable de alimentación USB • Colector de leche
- Extensor de ajuste del sujetador

Montaje del dispositivo

03

Para montar el dispositivo, siga los pasos que se indican a continuación


ADVERTENCIAS

- Asegúrese de limpiar el extractor siguiendo las instrucciones de este manual.
- Asegúrese de montar correctamente el extractor, tal y como se indica en este manual.
- Para evitar fugas, elimine los residuos alrededor del embudo antes del montaje.
- Lávese bien las manos antes de montar los componentes limpios.


1. Monte la válvula en el colector, prestando atención al ángulo de montaje.




2. Coloque la membrana de silicona en el colector y presiónela con las manos para que los bordes queden bien sujetos para garantizar un sellado perfecto.

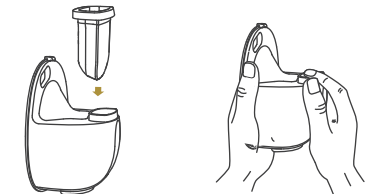

3. Para montar el embudo en el colector de leche, asegúrese de alinear la ranura de silicona con la ranura de reflujo del colector.

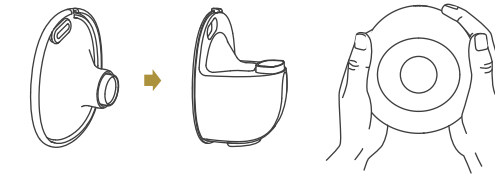

4. Monte el cuerpo principal del extractor de leche en el colector, alinee la muesca situada debajo del cuerpo principal con la membrana de silicona y móntelo hacia abajo para que encaje en el colector y pueda garantizar un sellado completo.

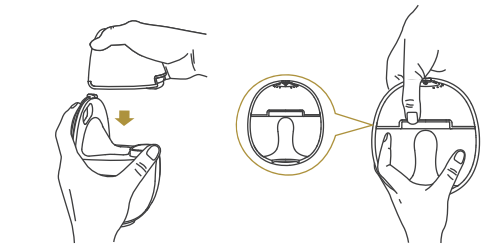


BE ADVISED

El extractor de leche no funciona durante la carga.


Guía de extracción

05


1. Presione el embudo firmemente contra su pecho, sin dejar huecos y asegúrese de que sus pezones estén centrados. Manténgalo en posición vertical. Tenga cuidado de no distorsionar la posición del dispositivo y de su pecho, de lo contrario el extractor de leche no succionará.

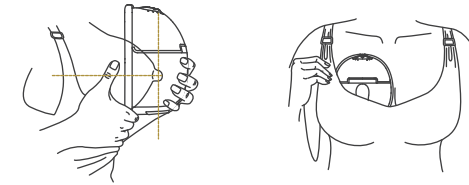

2. Mantenga pulsado el botón de inicio para poner en marcha el extractor de leche hasta que se encienda la pantalla.

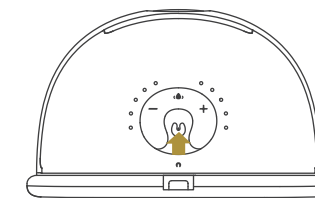


3. Pulse brevemente el botón después de encender el extractor de leche para cambiar de un modo a otro. Con este botón puede cambiar entre dos modos diferentes (modo de extracción y modo de masaje). El indicador luminoso parpadea cuando está en modo masaje y permanece encendido cuando está en modo extracción.

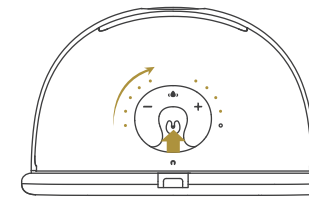


El indicador luminoso parpadea cuando está en modo masaje y permanece encendido cuando está en modo extracción.


4. Hay 9 niveles disponibles en cada modo. Cada luz corresponde a uno de los 9 niveles. (Aumento del nivel de izquierda a derecha). Puede seleccionar el nivel de succión que le resulte más cómodo pulsando brevemente el botón «+» para subir el nivel y el botón «-» para bajarlo.

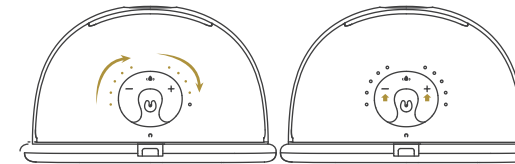

5. Pulse brevemente el botón para activar o desactivar la función térmica. Cuando la función térmica está activada, se enciende el indicador (el parpadeo indica que se está calentando, la luz continua indica que se mantiene caliente). Si el indicador de la función térmica no está encendido en ese momento, compruebe si el elemento magnético del embudo está alineado con el motor del extractor. Después de utilizar la función térmica, pulse brevemente el botón ; si el indicador de la función térmica no se enciende, significa que esta función está desactivada.

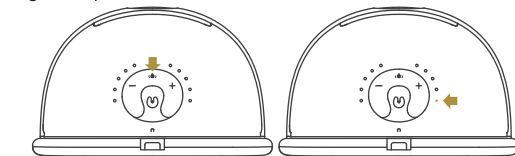


6. Pulse prolongadamente el botón de inicio para apagar el extractor de leche.

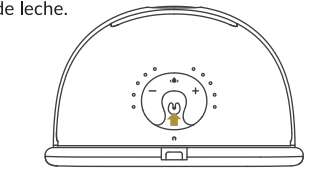


Consejos:

1. Este modelo tiene una función de memoria incorporada, cuando enciende el dispositivo, éste introduce automáticamente el modo de estimulación y el nivel de succión utilizados más recientemente.
2. Cuando se detiene el funcionamiento del dispositivo y no se pulsa ningún botón en 5 minutos, el extractor de leche se apaga automáticamente.
3. El extractor de leche se apagará automáticamente después de 20 minutos de funcionamiento.


1. Durante el uso, cuando el dispositivo esté completamente cargado, el indicador de encendido se iluminará en verde y permanecerá encendido; cuando el nivel de carga sea bajo, el indicador de encendido se iluminará en rojo. Cargue el dispositivo a tiempo.

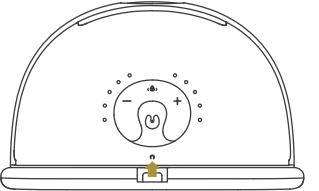

2. El dispositivo no se puede utilizar mientras se carga, en este momento la interfaz de la pantalla sólo muestra el nivel de carga actual. Durante la carga, el indicador parpadeará en rojo. La luz verde parpadeará cuando el dispositivo esté casi cargado y permanecerá encendida cuando esté completamente cargado.

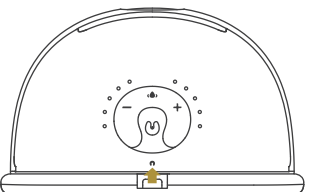

Relájese y siéntese en una silla cómoda, inclinándose ligeramente hacia delante (utilice un cojín para apoyar la espalda). Asegúrese de que su cuerpo y el extractor de leche están alineados.

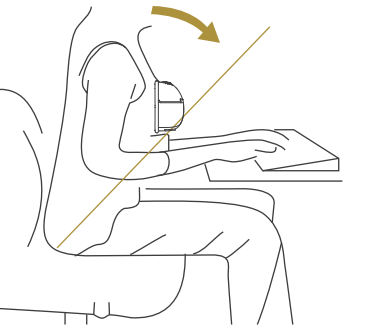

Postura de lactancia

Limpieza y mantenimiento

	Primer uso	Después de cada uso
Cuerpo del extractor	Encienda el extractor pulsando el botón de inicio	Limpie con un paño limpio y húmedo con alcohol etílico al 70 % o alcohol isopropílico cuando sea necesario. No sumerja el extractor de leche en el agua.
Embudo Membrana de silicona Válvula Colector de leche	Hervir en agua durante 5 minutos. No introduzca las siguientes piezas en el microondas: embudo, membrana de silicona, válvula y colector de leche	Limpie con detergente de lavavajillas suave o agua limpia.

ADVERTENCIAS

- Tenga cuidado al desmontar y limpiar la válvula; si la válvula está dañada, el extractor de leche no funcionará correctamente.
- Para limpiar la válvula, frótelas suavemente en agua tibia con unas gotas de detergente. No introduzca ningún objeto en la válvula, ya que podría dañar el dispositivo.

Limpieza a mano

- Coloque las piezas del extractor de leche en un recipiente limpio que solo utilice para artículos de alimentación infantil. No coloque las piezas del extractor de leche directamente en el fregadero.
- Añada detergente y agua caliente al recipiente.
- Limpie las piezas con un cepillo limpio utilizado solo para artículos de alimentación infantil.
- Aclare las piezas manteniéndolas bajo el grifo o sumergiéndolas en agua limpia en un recipiente aparte.
- Deje secar las piezas al aire. Coloque las piezas del extractor de leche, el recipiente y el cepillo para biberones sobre un paño de cocina o papel de cocina limpio y sin usar, en un lugar protegido de la suciedad y del polvo. No utilice un paño de cocina para frotar o dar palmaditas para secar las piezas.
- Limpie el recipiente y el cepillo para biberones. Aclárelos bien y déjelos secar al aire después de cada uso. Lávelos a mano al menos cada pocos días.

Ajuste la longitud de los tirantes del sujetador para que la extracción resulte más cómoda. Coloque un extremo del extensor de ajuste del sujetador en la hebilla interior del sujetador de lactancia. La longitud del extensor del sujetador puede ajustarse colocando la hebilla del sujetador de lactancia en el otro extremo del extensor de ajuste del sujetador.

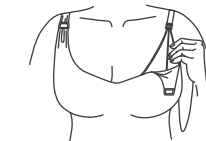


Imagen 1

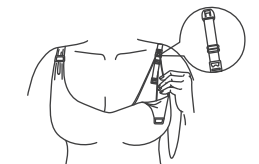


Imagen 2



Imagen 3

Cuando termine de extraerse leche, retire el extractor del pecho. Mantenga el extractor de leche en posición vertical y retire la parte del motor. Sujete el colector de leche para verter la leche en el biberón. Asegúrese de que el hueco del colector de leche de la copa de lactancia está alineado con la boca del biberón para evitar que se derrame la leche materna.


1. Cuando termine de extraerse leche, pulse el botón de inicio para apagar el dispositivo y separe el pecho del embudo del extractor con el dedo; a continuación, retire con cuidado el extractor del pecho.



2. Separe el colector de leche del motor del extractor para prepararlo para la alimentación/almacenamiento. Limpie las demás piezas usadas siguiendo las instrucciones.



3. Vierta la leche en el biberón; asegúrate de que la ranura está alineada con la boca del biberón.

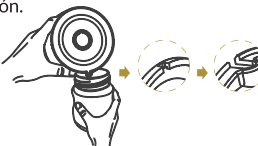

1. Conservar la leche materna

- Guarde únicamente la leche materna recogida con extractores de leche esterilizados.
- La leche extraída puede introducirse en una bolsa de almacenamiento de leche limpia y esterilizada o en un biberón con tapa, y se tiene que poner inmediatamente en el frigorífico.

ADVERTENCIAS

- No congele la leche materna más de una vez.
- No mezcle la leche materna fresca con la leche materna congelada.
- Asegúrese de desechar la leche materna sobrante después de la toma.
- La leche extraída puede conservarse en el frigorífico durante 48 horas o en el congelador hasta tres meses. Etiquete claramente el biberón de leche o la bolsa de conservación de la leche con la fecha y la hora.

Cómo descongelar la leche materna

Coloque la leche materna congelada en el frigorífico durante toda la noche para que se descongele. Si necesita consumir leche congelada urgentemente, puede utilizar un recipiente con agua caliente para descongelar la leche materna. Después de descongelar la leche materna, debe consumirse en un plazo de 24 horas.

Cómo calentar la leche materna

- Coloque el biberón en un recipiente con agua caliente o caliente la leche materna de forma segura y rápida utilizando un calentador de biberones y alimentos.

- ¡Atención! Antes de alimentar a su bebé, asegúrese de comprobar la temperatura de la leche materna. No utilice el microondas ni el horno para calentar la leche materna, ya que podría destruir nutrientes y anticuerpos importantes.
- Tenga en cuenta que el calentamiento desigual puede provocar un sobrecalentamiento parcial del líquido, lo que puede causar quemaduras.
- No sumerja el biberón de leche en agua hirviendo para calentarla, ya que podría romperse o agrietarse.

innogio

Manufactured in China for INNOGIO sp. z o.o.
Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland

www.innogio.com

@innogio.official @innogio_com

